

## **Инструкция по применению**

Универсальный раствор для хранения, очистки и промывки мягких контактных линз с контейнером «Офтальмикс Био».

### **Предназначение**

Раствор для контактных линз предназначен для всех типов мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые и цветные. Разработан для чувствительных глаз с функцией дополнительного увлажнения. Функция увлажнения обеспечивается абсолютно безопасным природным компонентом растительного происхождения Метоцел® (искусственная слеза).

Опускается без рецепта врача.

### **Функции**

Очистка, дезинфекция, промывка, удаление протеинов и других отложений, хранение, увлажнение и смазка.

### **Состав**

Стерильный изотонический раствор, содержащий борную кислоту, динатрия эдетат, натрия хлорид, этидронат 4Na, натрия тетраборат.

Активные компоненты: полоксамин, полигексаметилен бигуанид, гидроксипропилметилцеллюлоза (Метоцел®).

### **Поставляемые емкости:**

385 мл, 270 мл, 160 мл

### **Меры безопасности**

Предупреждения и рекомендации:

- следовать рекомендациям врача офтальмолога и инструкции по применению;
- не использовать раствор при нарушении целостности упаковки;
- хранить при комнатной температуре;
- избегать попадания прямых солнечных лучей;
- хранить в недоступном для детей месте;
- не пользоваться раствором более 3 месяцев после вскрытия флакона;
- не промывать контейнер водопроводной водой;
- не прикасаться кончиком флакона к посторонним предметам;
- не использовать при истечении срока годности.

В случае аллергии или непереносимости прекратить применение и обратиться к врачу-офтальмологу за консультацией.

При длительном хранении линз рекомендуется заменять раствор в контейнере для повторной дезинфекции (после 7 дней хранения).

### **Очистка**

1) Откройте и наполните контейнер свежим раствором до края. Крышки контейнера поместите на чистую близлежащую поверхность внутренней стороной наружу. Обратите внимание на буквы, нанесенные на наружной стороне. В случае, если правый и левый глаз имеют разную диоптрийность (силу линз), всегда помещайте правую линзу под крышку с латинской буквой «R» (указывает на емкость для линзы правого глаза) и левую под крышку с латинской буквой «L» (указывает на емкость для линзы левого глаза). Правую крышку поместите около правой емкости контейнера, а левую около левой.

2) Тщательно вымойте, ополосните и вытрите руки перед манипуляциями с контактной линзой.

3) Всегда начинайте манипуляции с правой линзой. Это позволит избежать ошибок с соответствием силы линзы для левого и правого глаза.

4) Положите линзу на ладонь и нанесите на неё несколько капель раствора.

5) Осторожно потрите обе стороны линзы кончиком пальца другой руки в течение 10–15 секунд.

### **Промывание**

После очистки сполосните линзу свежим раствором перед помещением в контейнер.

### **Дезинфекция и хранение**

Поместите правую линзу в контейнер. Повторите процедуру с левой линзой. Плотно закройте крышки контейнера (не перепутайте правую и левую крышки). Минимальное время дезинфекции – 4 часа.

### **Ношение линз**

После завершения дезинфекции извлеките правую линзу из контейнера и установите на правый глаз. Затем установите левую линзу на левый глаз.

### **Уход за контейнером**

После использования контейнер должен быть тщательно промыт раствором для контактных линз и высушен.

### **Регистрационное удостоверение на медицинское изделие**

№ ФСЗ 2010/07896 от 16 сентября 2010 года

### **Организация, уполномоченная на принятие претензий**

ООО «Медицинская группа Офтадерм» Россия 115230, г. Москва, вн. тер. Муниципальный округ Нагатинско-Садовники, ш. Каширское, д.3, к.2, стр.4, этаж 5, ком.22