


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНЫ Clear 1-day

ОТКРЫТИЕ БЛИСТЕРА:



- Переверните и откройте.

УСТАНОВКА ЛИНЗ:

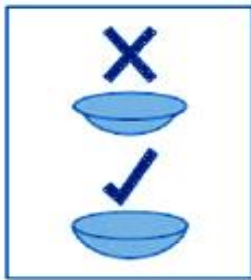

- Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку.



- Потяните нижнее и верхнее веко.
- Осторожно поместите линзу на роговицу.

СНЯТИЕ ЛИНЗ:



- Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх.



- Сожмите линзу большим и указательным пальцами и снимите ее.

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ **Мягкие контактные линзы Clear 1-day** СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПАЦИЕНТУ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ, ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ И ИНСТРУКЦИИ.

СОСТАВ УПАКОВКИ

Упаковка содержит: 30 (Тридцать) мягких контактных линз в блистерах в буферном солевом растворе. Линзы тонированы для простоты обращения. Материал: 42% хайоксифилкон А, 58% вода. Стерильно. Стерилизовано сухим паром под давлением. Рекомендуемый срок ношения - 1 день.

НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНЫ Clear 1-day

Мягкие контактные линзы Clear 1-day дневного ношения предназначены для оптической коррекции зрения пациентов, не имеющих заболеваний глаз, с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения. Дневной режим ношения – менее 24 часов в режиме бодрствования. Продолжительность дневного ношения контактных линз определяется специалистом по контактной коррекции зрения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНЫ Clear 1-day

Установка линз: Тщательно вымойте руки. Выньте линзу из блистера или контейнера. Положите линзу на подушечку указательного пальца. Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку. Потяните нижнее и верхнее веко и посмотрите вверх. Прикоснитесь пальцем с линзой к глазу, слегка прижав ее. Осторожно поместите линзу на роговицу. Медленно переведите взгляд вниз. Отпустите нижнее веко. Поморгайте. Повторите операцию с правым глазом.

Снятие линз: Тщательно вымойте руки. Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх. Положите подушечку указательного пальца на линзу и сдвиньте линзу вниз. Сожмите линзу большим и указательным пальцами и снимите ее. Повторите с другой линзой.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Не спите в линзах. Линзы предназначены на **ОДИН РАЗ**, а затем **ВЫБРАСЫВАЮТСЯ** в конце каждого ношения. Следующий период ношения следует начинать с новой линзы. Повторное использование одноразовых контактных линз может увеличить риск инфекции, сухость и дискомфорт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

При появлении дискомфорта обратитесь к врачу. Перед установкой не прикасайтесь к табачным изделиям. Устанавливайте линзы до нанесения косметики.

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА УПАКОВКЕ

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | Отпуск по рецепту врача-офтальмолога | | Медицинское изделие |
| | Стерилизовано сухим паром под давлением | | Не использовать повторно |
| | Внимание. Обратитесь к инструкции | | Код партии (Номер партии) |
| | Не используйте, если нарушена стерильность продукта или его упаковка | | Срок годности |
| | Производитель | | Температурный режим хранения |
| | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе по медицинскому изделию | | Базовая кривизна |
| | | | Диаметр |

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «КЛИАРЛЭБ СГ ПТЕ. ЛТД», Сингапур, CLEARLAB SG PTE. LTD, 139 Joo Seng Road, 368362, Singapore.

ИМПОРТЕР: ООО «Медицинская группа Офтатерм», Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.2, этаж цоколь, офис № 2. Тел.: +7(495)777-71-16. E-mail: info@obagi.ru, info@oftaderm.ru Web: www.obagi.ru, www.oftaderm.ru

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/05604 от 17.12.2009 г.