


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАМЕНЫ Clear All-day

### УСТАНОВКА ЛИНЗ:

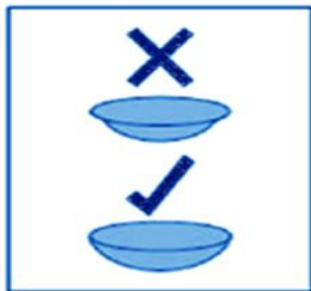


• Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку.



- Потяните нижнее и верхнее веко.
- Осторожно поместите линзу на роговицу.

### СНЯТИЕ ЛИНЗ:

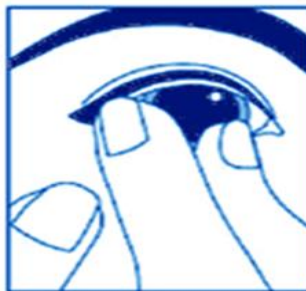

- Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх.



- Сожмите линзу большим и указательными пальцами и снимите ее.

### ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ **Мягкие контактные линзы Clear All-day** СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПАЦИЕНТУ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ, ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ И ИНСТРУКЦИИ.

### СОСТАВ УПАКОВКИ

**Упаковка содержит:** 6 (Шесть) мягких контактных линз в блистерах в буферном солевом растворе. Линзы тонированы для простоты обращения. Материал: 43% хайоксифилкон А, 57% вода. Стерильно. Стерилизовано сухим паром под давлением. Рекомендуемый срок ношения - 1 месяц.

### НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАМЕНЫ Clear All-day

**Мягкие контактные линзы Clear All-day** дневного ношения предназначены для оптической коррекции зрения пациентов, не имеющих заболеваний глаз, с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения.

Дневной режим ношения – менее 24 часов в режиме бодрствования. Продолжительность дневного ношения контактных линз определяется специалистом по контактной коррекции зрения. Линзы следует очищать и дезинфицировать специальным раствором для линз.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАМЕНЫ Clear All-day

**Установка линз:** Тщательно вымойте руки. Выньте линзу из блистера или контейнера. Положите линзу на подушечку указательного пальца. Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку. Потяните нижнее и верхнее веко и посмотрите вверх. Прикоснитесь пальцем с линзой к глазу, слегка прижав ее. Осторожно поместите линзу на роговицу. Медленно переведите взгляд вниз. Отпустите нижнее веко. Поморгайте. Повторите операцию с правым глазом.

**Снятие линз:** Тщательно вымойте руки. Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх. Положите подушечку указательного пальца на линзу и сдвиньте линзу вниз. Сожмите линзу большим и указательными пальцами и снимите ее. Повторите с другой линзой.

### ХРАНЕНИЕ И УХОД

Вымойте руки перед манипуляциями с линзами. Откройте контейнер для линз (поставляется с раствором для контактных линз). Снимите линзу и положите на ладонь. Нанесите 3-4 капли раствора на линзу. Осторожно потрите линзу круговыми движениями. Ополосните линзу раствором. Наполните контейнер до риски. Поместите линзы в контейнер. Закройте крышки. Оставьте линзы в растворе минимум на 4 часа. См. детальную инструкцию на упаковке раствора.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При появлении дискомфорта обратитесь к врачу. Перед установкой не прикасайтесь к табачным изделиям. Устанавливайте линзы до нанесения косметики.

### ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА УПАКОВКЕ



Отпуск по рецепту врача-офтальмолога



Стерилизовано сухим паром под давлением



Внимание. Обратитесь к инструкции



Не используйте, если нарушена стерильность продукта или его упаковка



Производитель



Уполномоченный представитель в Европейском сообществе по медицинскому изделию



Медицинское изделие



Не использовать повторно



Код партии (Номер партии)



Срок годности



Температурный режим хранения

BC

Базовая кривизна

DIA

Диаметр

### СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** «КЛИАРЛЭБ СГ ПТЕ. ЛТД», Сингапур, CLEARLAB SG PTE. LTD, 139 Joo Seng Road, 368362, Singapore.

**ИМПОРТЕР:** ООО «Медицинская группа Офтатерм», Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.2, этаж цоколь, офис № 2. Тел.: +7(495)777-71-16. E-mail: info@obagi.ru, info@oftaderm.ru Web: www.obagi.ru, www.oftaderm.ru

**Регистрационное удостоверение** ФСЗ №2009/05604 от 17.12.2009 г.