


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ КВАРТАЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ

## Офтальмикс Colors

### УСТАНОВКА ЛИНЗ:

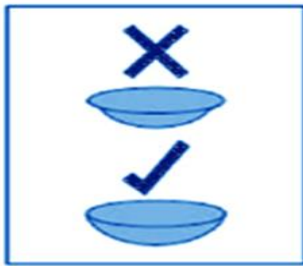

• Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку.



• Потяните нижнее и верхнее веко.  
• Осторожно поместите линзу на роговицу.

### СНЯТИЕ ЛИНЗ:



• Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх.



• Сожмите линзу большим и указательным пальцами и снимите ее.

### ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Мягкие цветные контактные линзы Офтальмикс Colors СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПАЦИЕНТУ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ, ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ И ИНСТРУКЦИИ.

### СОСТАВ УПАКОВКИ

Упаковка содержит: 2 (две) мягкие контактные линзы в блистерах в буферном солевом растворе. Материал: 60% полимакон, 40% вода. Стерильно. Стерилизовано сухим паром под давлением. Рекомендуемый срок ношения - до 3-х месяцев. Для коррекции зрения и цвета.

### НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНЫ

#### Офтальмикс Colors

Мягкие цветные контактные линзы Офтальмикс Colors дневного ношения предназначены для оптической коррекции зрения пациентов, не имеющих заболеваний глаз, с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения. Дневной режим ношения – менее 24 часов в режиме бодрствования. Продолжительность дневного ношения контактных линз определяется специалистом по контактной коррекции зрения. Линзы следует очищать и дезинфицировать специальным раствором для линз. Рекомендовано использовать многофункциональный раствор ОФТАЛЬМИКС БИО.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЯГКИХ ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНЫ Офтальмикс Colors

**Установка линз:** Тщательно вымойте руки. Выньте линзу из блистера или контейнера. Положите линзу на подушечку указательного пальца. Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку. Потяните нижнее и верхнее веко и посмотрите вверх. Прикоснитесь пальцем с линзой к глазу, слегка прижав ее. Осторожно поместите линзу на роговицу. Медленно переведите взгляд вниз. Отпустите нижнее веко. Поморгайте. Повторите операцию с правым глазом.

**Снятие линз:** Тщательно вымойте руки. Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх. Положите подушечку указательного пальца на линзу и сдвиньте линзу вниз. Сожмите линзу большим и указательным пальцами и снимите ее. Повторите с другой линзой.

### ХРАНЕНИЕ И УХОД

Вымойте руки перед манипуляциями с линзами. Откройте контейнер для линз (поставляется с раствором для контактных линз). Снимите линзу и положите на ладонь. Нанесите 3-4 капли раствора на линзу. Осторожно потрите линзу круговыми движениями. Ополосните линзу раствором. Наполните контейнер до риски. Поместите линзы в контейнер. Закройте крышки. Оставьте линзы в растворе минимум на 4 часа. См. детальную инструкцию на упаковке раствора.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При появлении дискомфорта обратиться к врачу. Перед установкой не прикасаться к табачным изделиям. Устанавливать линзы до нанесения косметики. После надевания линз рекомендуется на 1-2 минуты прикрыть глаза для образования под линзой слезной пленки и исчезновения неприятных ощущений. Пользуйтесь аэрозолями (лаками для волос, дезодорантами) до того, как надели линзы. Надевайте линзы до нанесения косметики, снимайте линзы перед удалением косметики.

### ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА УПАКОВКЕ



Отпуск по рецепту врача-офтальмолога



Стерилизовано сухим паром под давлением



Внимание. Обратитесь к инструкции



Не используйте, если нарушена стерильность продукта или его упаковка



Производитель



Уполномоченный представитель в Европейском сообществе по медицинскому изделию



Медицинское изделие



Код партии (Номер партии)



Срок годности



Температурный режим хранения

BC

Базовая кривизна

DIA

Диаметр

### СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** «МИ ГВАНГ КОНТАКТ ЛЕНЗ КО., ЛТД», Республика Корея, MI GWANG CONTACT LENS CO., LTD, 116-2 Hyeopseok-ri, Namcheon-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «КЛИАРЛЭБ СГ ПТЕ. ЛТД», Сингапур, CLEARLAB SG PTE. LTD, 139 Joo Seng Road, 368362, Singapore.

**ИМПОРТЕР:** ООО «Медицинская группа Офтатерм», Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.2, этаж цоколь, офис № 2. Тел.: +7(495)777-71-16. E-mail: info@obagi.ru, info@oftaderm.ru Web: www.obagi.ru, www.oftaderm.ru

**Регистрационное удостоверение** ФСЗ №2012/11698 от 13 марта 2012 г.