


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Офтальмикс Butterfly Colors One Month

УСТАНОВКА ЛИНЗ:

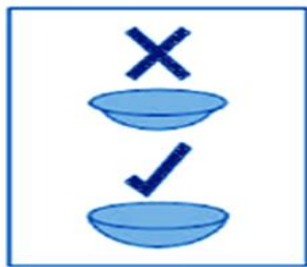

• Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку.



• Потяните нижнее и верхнее веко.
• Осторожно поместите линзу на роговицу.

СНЯТИЕ ЛИНЗ:



• Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх.



• Сожмите линзу большим и указательным пальцами и снимите ее.

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Линзы контактные мягкие цветные Офтальмикс Butterfly Colors One Month СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПАЦИЕНТУ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ, ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ И ИНСТРУКЦИИ.

СОСТАВ УПАКОВКИ

Упаковка содержит: 2 (две) мягкие контактные линзы в блистерах в буферном солевом растворе. Материал: 42% полихема, 58% вода. Стерильно. Стерилизовано сухим паром под давлением. Рекомендуемый срок ношения - до 1 (один) месяц. Для коррекции зрения и цвета.

НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯГКИХ ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Офтальмикс Butterfly Colors One Month

Мягкие цветные контактные линзы Офтальмикс Butterfly Color One Month дневного ношения предназначены для оптической коррекции зрения пациентов, не имеющих заболеваний глаз, с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения. Дневной режим ношения – менее 24 часов в режиме бодрствования. Продолжительность дневного ношения контактных линз определяется специалистом по контактной коррекции зрения. Линзы следует очищать и дезинфицировать специальным раствором для линз. Рекомендовано использовать многофункциональный раствор ОФТАЛЬМИКС БИО.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЯГКИХ ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Офтальмикс Butterfly Colors One Month

Установка линз: Тщательно вымойте руки. Выньте линзу из блистера или контейнера. Положите линзу на подушечку указательного пальца. Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку. Потяните нижнее и верхнее веко и посмотрите вверх. Прикоснитесь пальцем с линзой к глазу, слегка прижав ее. Осторожно поместите линзу на роговицу. Медленно переведите взгляд вниз. Отпустите нижнее веко. Поморгайте. Повторите операцию с правым глазом.

Снятие линз: Тщательно вымойте руки. Взявшись за нижнее веко, потяните его, глядя вверх. Положите подушечку указательного пальца на линзу и сдвиньте линзу вниз. Сожмите линзу большим и указательным пальцами и снимите ее. Повторите с другой линзой.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Вымойте руки перед манипуляциями с линзами. Откройте контейнер для линз (поставляется с раствором для контактных линз). Снимите линзу и положите на ладонь. Нанесите 3-4 капли раствора на линзу. Осторожно потрите линзу круговыми движениями. Ополосните линзу раствором. Наполните контейнер до риски. Поместите линзы в контейнер. Закройте крышки. Оставьте линзы в растворе минимум на 4 часа. См. детальную инструкцию на упаковке раствора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При появлении дискомфорта обратиться к врачу. Перед установкой не прикасаться к табачным изделиям. Устанавливать линзы до нанесения косметики. После надевания линз рекомендуется на 1-2 минуты прикрыть глаза для образования под линзой слезной пленки и исчезновения неприятных ощущений. Пользуйтесь аэрозолями (лаками для волос, дезодорантами) до того, как надели линзы. Надевайте линзы до нанесения косметики, снимайте линзы перед удалением косметики.

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА УПАКОВКЕ

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | Отпуск по рецепту врача-офтальмолога | | Медицинское изделие |
| | Стерилизовано сухим паром под давлением | | Код партии (Номер партии) |
| | Внимание. Обратитесь к инструкции | | Срок годности |
| | Не используйте, если нарушена стерильность продукта или его упаковка | | Температурный режим хранения |
| | Производитель | | Базовая кривизна |
| | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе по медицинскому изделию | | Диаметр |

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Политач Контактленс», Корея, Polytouch Contactlens, 108-1, Hyeorpeok-ri, Namcheon-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongsan-do, Korea.

ИМПОРТЕР: ООО «Медицинская группа Офтальмикс», Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.2, этаж цоколь, офис № 2. Тел.: +7(495)777-71-16. E-mail: info@obagi.ru, info@oftaderm.ru Web: www.obagi.ru, www.oftaderm.ru

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/03537 от 20 января 2009 г.